

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch.



Gefahr



Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden:

1. Trennen Sie dieses Gerät immer vom elektrischen Anschluss, sofort nach der Verwendung und vor der Reinigung.
2. Tragen Sie bei der Benutzung keinesfalls metallische Gegenstände.
3. Überprüfen Sie sorgfältig die Deckel von den Jadeprojektoren vor jedem Gebrauch. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn es Anzeichen der Beschädigung gibt, wie z.B. Risse oder plötzlich hohe Temperatur.
4. Halten Sie das Gerät immer trocken. Lassen Sie es niemals im nassen oder feuchten Zustand laufen.



Warnung



Um die Gefahr von Brand, Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen zu vermeiden, schließen Sie dieses Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.

1. Lassen Sie das Gerät niemals außer Acht, wenn es angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker raus, wenn es nicht benutzt wird oder vor dem Auf- und Ausbau.
2. Verwenden Sie bei der Benutzung des Ceragem Masters keine Bettdecke als Unterlage oder Kissen. Es kann sonst zu Verbrennungen oder elektrischen Schocks durch Überhitzung kommen.
3. Besondere Aufsicht ist dann notwendig, wenn der Ceragem Master von Kindern, älteren Leuten oder behinderten oder kranken Personen benutzt wird.
6. Verwenden Sie die Kabel nicht zum Tragen.
7. Halten Sie die Kabel von Wärmequellen fern z. B. Heizung.
8. Tun Sie keine Gegenstände in Ceragem Master hinein.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht draußen.
10. Lassen Sie das Gerät nicht dort laufen, wo Sauerstoffflaschen benutzt werden.
11. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie alle Tasten auf "AUS" und trennen Sie das Gerät anschließend vom Anschluss.
12. Achten Sie auf die heißen Teile, da es zu Verbrennungen kommen kann. Verwenden Sie es nicht auf unempfindliche Hautbereiche oder Bereiche mit schlechter Blutzirkulation. Nach dem Gebrauch kann übrig gebliebene Restwärme für Kinder oder kranke Personen gefährlich werden.

Warnung!

Halten Sie Kinder von der Massageliege fern!


4. Benutzen Sie das Gerät nur so wie es im Handbuch dargestellt ist. Verwenden Sie nur Originalteile vom Hersteller.
5. Benutzen Sie das Gerät niemals in folgenden Fällen:
 - bei Beschädigung der Kabel oder Stecker
 - bei Nicht-Funktionieren
 - wenn es auf den Boden gefallen oder kaputt gegangen oder ins Wasser gefallen ist.Sie sollten sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.
13. Hohe Temperaturen können zu Verbrennungen führen, unabhängig von der Temperatureinstellung.
14. Verbiegen Sie das Gerät nicht. Falten Sie die Einzelteile/Matten nicht.
15. Schließen Sie das Gerät nur an eine richtig geerdete Steckdose an. Lesen Sie die Anweisungen für den Elektrischen Anschluss.
16. Die Installation sollte nur durch einen anerkannten Elektriker oder einen Fachmann erfolgen.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf.

Anweisungen für den Elektrischen Anschluss

Dieses Produkt darf nur an 230V Wechselstrom über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Der Anschluss darf nur an eine nach VDE 0100 ausgeführte Elektroanlage erfolgen.

GEFAHR... Falscher Anschluss könnte zu Beschädigungen durch elektrischen Schlag führen. Lassen Sie sich von einem anerkannten Elektrotechniker oder Fachberater beraten, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob das Produkt richtig angeschlossen ist. Bauen Sie niemals selbst den beigegefügten Stecker nach Ihrer Vorstellung um.

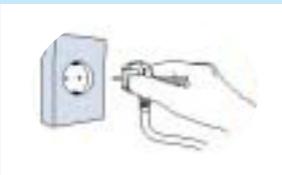

Dieses Produkt ist für die Spannung von 220-240 Volt vorgesehen und hat einen Netzstecker(s. Bild). Verwenden Sie nur Schukosteckdosen. Benutzen sie keinen anderen Adapter.

Informationen für den Verbraucher...

Diese Ausrüstung ist von CE geprüft und bestätigt worden. Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen montiert und benutzt wird, können Störungen von Empfang-Verbindungen auftreten. Geben Sie bei solchen Umständen bei der Montage besonders Acht. Wenn diese Ausrüstung an Radio oder Fernseher Störungen verursachen, muss der Benutzer selber entscheiden, ob das Gerät weiterläuft oder ausgeschaltet wird. Folgende Maßnahmen sind dem Benutzer empfohlen, um die Störungen zu beheben:

- Stellen Sie die Antenne um oder verlagern Sie diese woandershin.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und der Antenne.
- Schließen Sie das Gerät woanders an, wenn es Probleme mit der Antenne gibt.
- Fragen Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker.

WARNUNG... Änderungen oder Umbauen an dem Gerät sind keinesfalls gestattet. Die Berechtigung gilt nur dem Hersteller, der das Gerät liefert.

Lesen Sie das Handbuch durch, bevor Sie dieses Massagegerät benutzen.

Inhaltsverzeichnis

I Einleitung des Produktes

1. Eigenschaften des CGM-M35005
2. Beschreibung der Teile.....6
3. Beschreibung der Fernbedienung.....8

II Montage des Produktes

1. Auspacken.....11
2. Vor der Montage.....12
3. Montage des Produktes13
4. Testversuch nach der Montage16


III Benutzung des Produktes

1. Benutzung der Fernbedienung.....19
 - Automatischer Modus
 - Halbautomatischer Modus
 - Externer Projektor
2. Einstellung der Epoxidcarbon-Platten (Heizplatten).....22
3. Verschiedene Methoden23

IV Wartung des Produktes

1. Maßnahmen zur Sicherheit.....27
2. Bevor Sie den Kundendienst anrufen29
3. Technische Daten30
 - Garantie31

I . Einleitung des Produktes

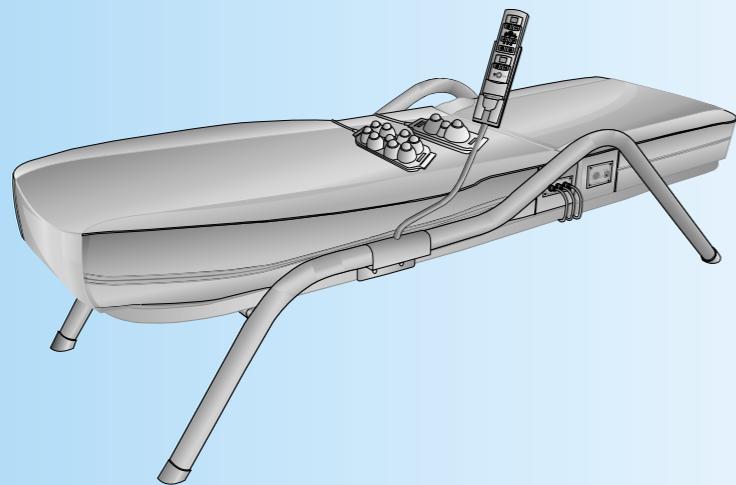

ceragem
master
CGM-M3500

1. Eigenschaften des CGM-M3500
2. Beschreibung der Teile
3. Beschreibung der Fernbedienung

1. Eigenschaften des CGM-M3500

1. Dies ist ein elektronisch hochentwickeltes Gerät mit schönem Design

Dieses verfeinerte und ergonomisch entworfene Produkt passt in jede Wohnung und führt Sie endlich auf dem Weg in ein gesundes und bequemes Leben.

2. Haltbares und luxuriöses Futter

Das in diesem Produkt verwendete Futter besteht aus speziellen Materialien, die besonders bei Sitzpolstern in luxuriösen Automobilen benutzt werden, um dem Benutzer angenehmen Komfort zu bieten. Das Material wird mit Hilfe der Schwammherstellungstechnik produziert und ist extrem haltbar.

3. Bequeme Fernbedienungs-Halterung

Dieses Produkt hat eine multifunktionale Fernbedienung und eine bequeme Fernbedienungs-Haltervorrichtung, die sich um 360° drehen lässt. Dadurch kann der Benutzer das Gerät mühelos steuern.

4. Ein ergonomisch gebogener Entwurf

Durch die ergonomisch entworfene Führungslinie bewegt sich der interne Projektor passend an dem Rücken des Benutzers entlang, was den Fingerdruck-Effekt auf die untere und obere Wirbelsäule erhöht.

5. Sicherer Interner Projektor

Der neue kreative Entwurf des internen Projektors aus Jade, woraus infrarote Strahlen herauskommen, bietet dem Benutzer mehr Komfort als je zuvor.

6. Patentierte Epoxidcarbon-Platte(Heizplatten)

Zusätzlich zu den infraroten Strahlen, die durch die Jaderollen emittiert werden, werden in den Haupt- und Ergänzungsmatten die Epoxidcarbon-Platten angewendet, die eine japanische Firma entwickelt hat. Diese Platten maximieren die Wirkung der Wärmeenergie und der infraroten Strahlen für den Rücken und den Unterkörper.

7. Komfort der externen Projektoren

Der ursprüngliche 6-Kugel-Projektor wurde durch einen 9-Kugel-Projektor ersetzt, um die Heizfähigkeit zu erhöhen. Man kann mit derselben Fernbedienung den 3-Kugel-Projektor und den 9-Kugel-Projektor gleichzeitig benutzen.

8. Multifunktion der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung lässt sich auch der externe Projektor steuern. Die Benutzung ist bequemer geworden, weil man nun alle Projektoren mit einer Fernbedienung steuern kann.

9. Verbesserte Ergänzungsmatte

Die Epoxidcarbon-Platten erzeugen 4~6 μ m lange infrarote Strahlen, die für den menschlichen Körper ideal sind. Die Platten sind nicht nur in der Hauptmatte, sondern auch in der Ergänzungsmatte angebracht. Dadurch kann der Benutzer den maximalen Heizeffekt für den Rücken und den Unterkörper genießen.


10. Ruhiger interner Motorbetrieb

Der interner Motorbetrieb verwendet kombinierte Ketten und Sprungeinheiten, welche die Geräusche herabsetzen und ein Abrutschen verhindern. Der Antrieb ist für den semipermanenten Gebrauch verstärkt.


2. Beschreibung der Teile

1 9-Kugel-Projektor und 3-Kugel-Projektor

Verwenden Sie die Projektoren für verschiedene Körperbereiche auch für den Bauch und Arm, welche die infraroten Strahlen nicht erreichen können, wenn der Benutzer auf dem Rücken liegt. 2 Personen können problemlos gleichzeitig benutzen.

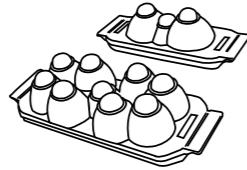

5 Interner Projektor

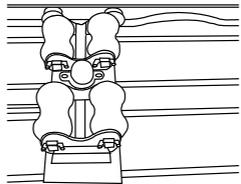


Er bewegt sich weich entlang des Rückens.

9 Schutzbezüge


Die Decken sind waschbar. Einfach vorher abziehen.

2 Verbindungsstelle (AC 220V)

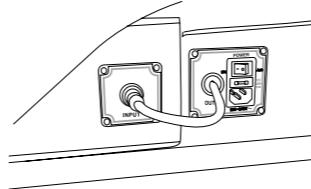


3 Fernbedienung


Alle Funktionen können mit der Fernbedienung gesteuert werden, außer der Temperatureinstellung der Epoxidcarbon-Platten (Heizplatten).

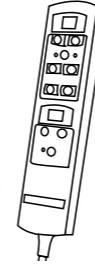

4 Stromverbindung mit der Ergänzungsmatte

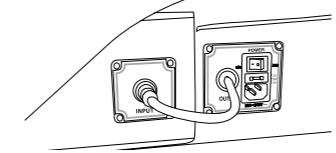

Sie liefert den Strom an die Epoxidcarbon-Platten (Heizplatten) in der Ergänzungsmatte.

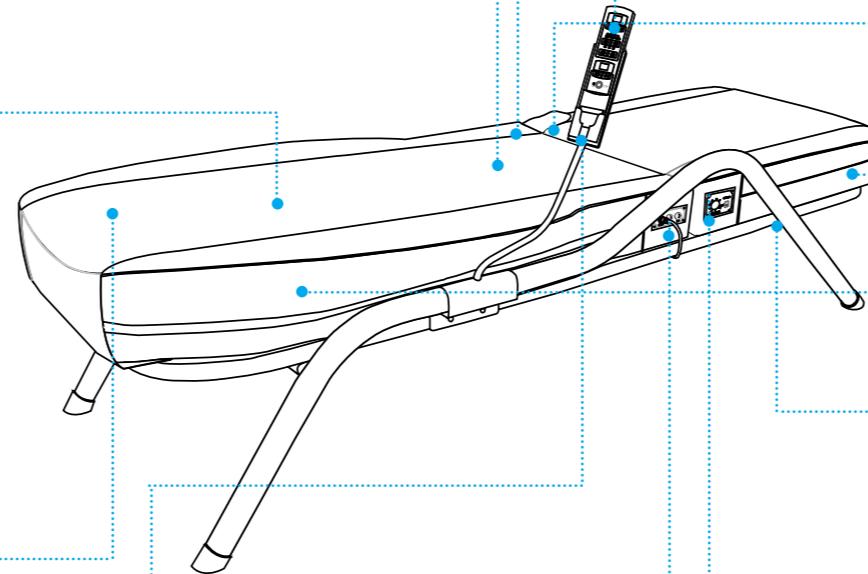


6 Ergänzungsmatte

7 Hauptmatte

8 Rahmen


10 Fernbedienungs-Halterung

Sie können die Fernbedienung hineintun, somit ist es für Sie bequemer.

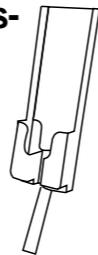


11 Projektor- und Fernbedienungs-Verbindung

Hier werden der 3-Kugel-Projektor, der 9-Kugel-Projektor sowie die Fernbedienung angeschlossen.

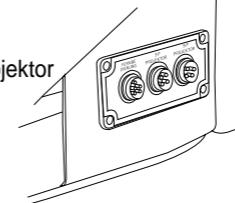


12 Einstellung der Temperatur für die Epoxidcarbon-Platten

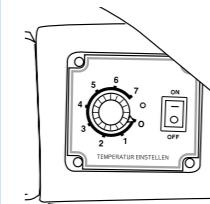

Damit kann die Temperatur der Epoxidcarbon-Platten (Heizplatten) in der Haupt- und Ergänzungsmatte eingestellt werden.

3. Beschreibung der Fernbedienung

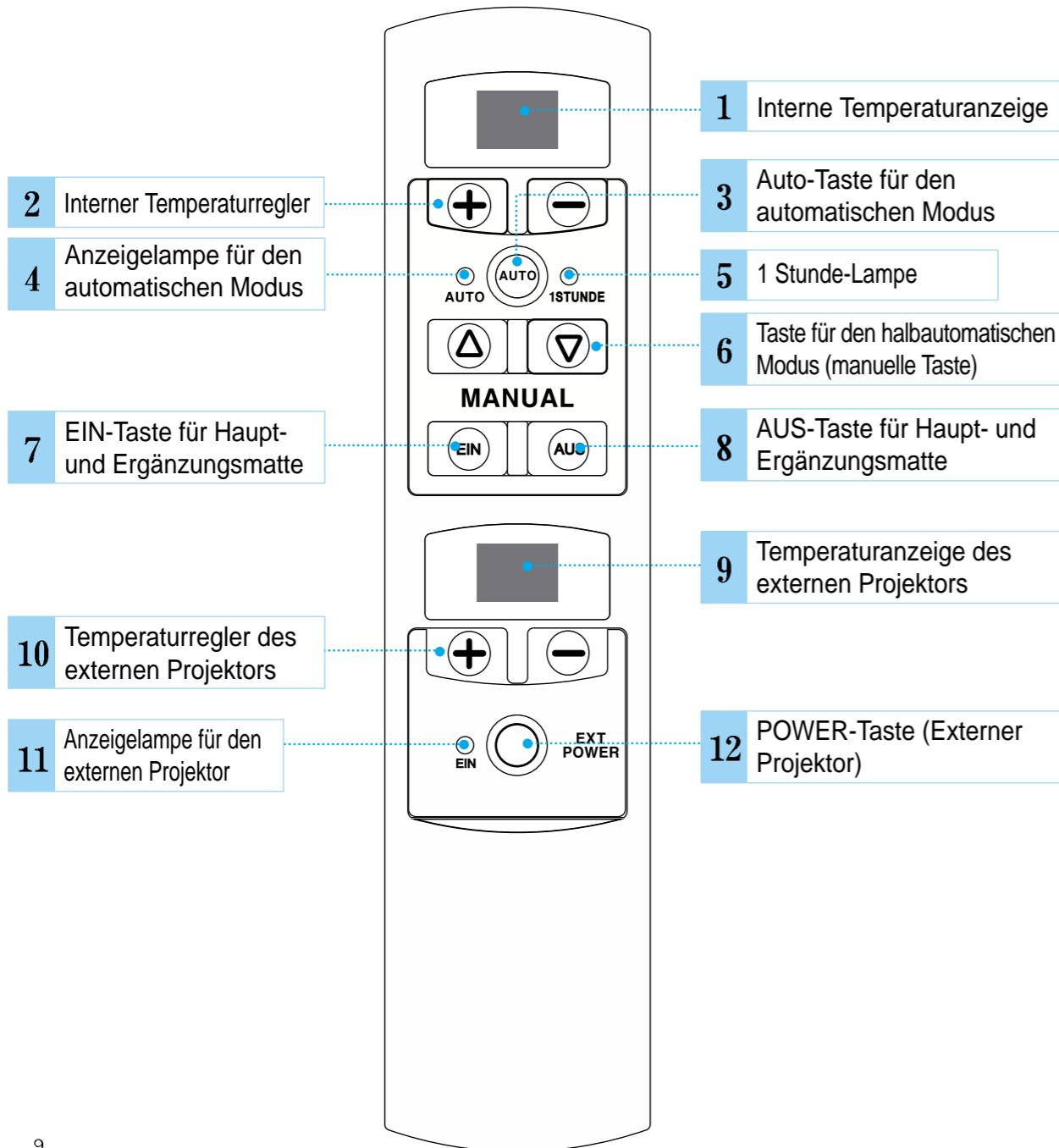

■ Fehlermeldung auf der Fernbedienung

- Wenn irgendein Problem in dem internen Projektor und/oder irgendwelchen anderen internen Teilen auftritt, erscheint eine Fehlermeldung auf der internen Temperaturanzeige auf der Fernbedienung (Siehe Nr.1 der Fernbedienung).
- Wenn irgendeine Störung mit dem externen Projektor auftritt, erscheint eine Fehlermeldung auf der externen Temperaturanzeige auf der Fernbedienung (Siehe Nr.9 der Fernbedienung).


1. Interne Temperaturanzeige

Anzeige	Erklärung
- L	Sie tritt auf, wenn die Raumtemperatur niedriger als der interne Projektor ist. Warten Sie einen Moment!
- H	Die Temperatur ist zu hoch. Schalten Sie das Gerät aus, und wenden Sie sich an den Kunden-Service.
- t	Es gibt eine Störung im internen Projektor. Schalten Sie das Gerät aus, und wenden Sie sich an den Kunden-Service.
- d	Es gibt eine Störung im Motor. Schalten Sie das Gerät aus, und wenden Sie sich an den Kunden-Service.
- C	Das System reagiert nicht. Innerhalb der Matte ist eine Störung aufgetreten, die kein Sensor erfassen kann. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker raus. Kurz danach tun Sie den Stecker wieder rein. Schalten Sie nun das Gerät noch einmal an. Wenn das Problem noch vorhanden ist, schalten Sie es wieder aus, und wenden Sie sich an den Kunden-Service.

2. Externe Temperaturanzeige

Anzeige	Erklärung
- L	Sie tritt auf, wenn die Raumtemperatur niedriger als der externe Projektor ist. Warten Sie einen Moment.
- H	Die Temperatur ist zu hoch. Schalten Sie das Gerät aus, und wenden Sie sich an den Kunden-Service.

II . Montage des Produktes

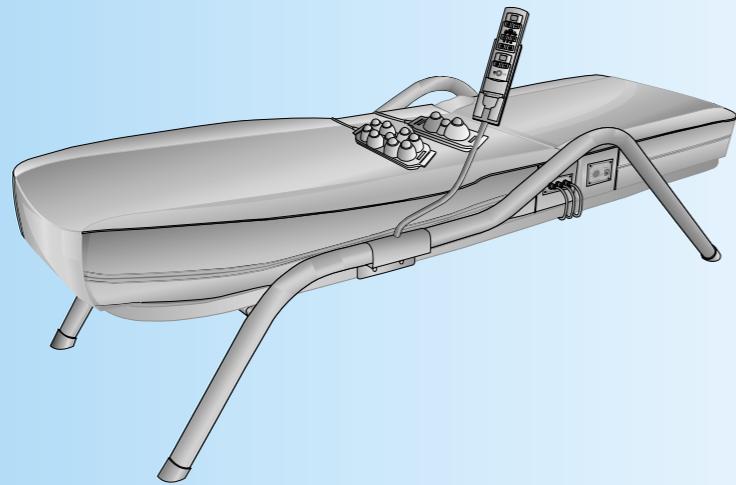


ceragem
master
CGM-M3500

1. Auspacken
2. Vor der Montage
3. Montage des Produktes
4. Testversuch nach der Montage


1. Auspacken

Achtung!

Prüfen Sie, ob alle Teile da sind, bevor Sie das Produkt montieren.

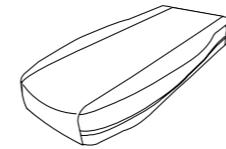


Hauptmatte

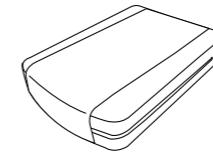


Ergänzungsmatte



9-Kugel-Projektor und 3-Kugel-Projektor

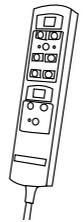


Fernbedienung

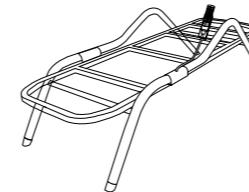


Rahmen




Netzanschlusskabel
220-240V

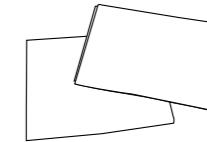

Schutzbezüge
(oben, unten)

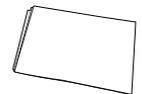

Decke

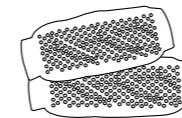


Projektor-
Verkleidungen
(2 Stück)



Gürtel




Handbuch

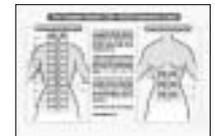

Beschreibung für
die jeweiligen
Haltepunkte

2. Vor der Montage

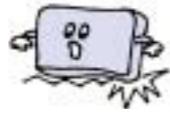

1. Stellen Sie das Gerät sicher auf einer glatten Ebene hin.
(Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden)



2. Stellen Sie das Gerät nicht an feuchten oder schmutzigen Orten auf.
(Andernfalls könnte es zum elektrischen Schlag oder Brand führen)



3. Legen Sie keine entzündlichen Gegenstände wie Kerze, Zigarette usw. auf dem Gerät.
(Andernfalls besteht Brandgefahr)



4. Legen Sie keine Wasser-Behälter, schwere oder sonstige Sachen auf das Gerät.
(Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, zum Brand oder anderen Beschädigungen führen)



5. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht im Betrieb ist.
(Andernfalls besteht Brandgefahr)




6. Legen Sie die Matten nicht aufs Bett.
(Es verringert den Fingerdruck-Effekt)


3. Montage des Produktes


- 1** Legen Sie die Hauptmatte und die Ergänzungsmatte auf den Rahmen und verbinden Sie die zwei Matten zusammen. (s. Anleitung für den Rahmenaufbau, die im Karton ist)

※ Legen Sie das Produkt auf einer glatten Ebene.

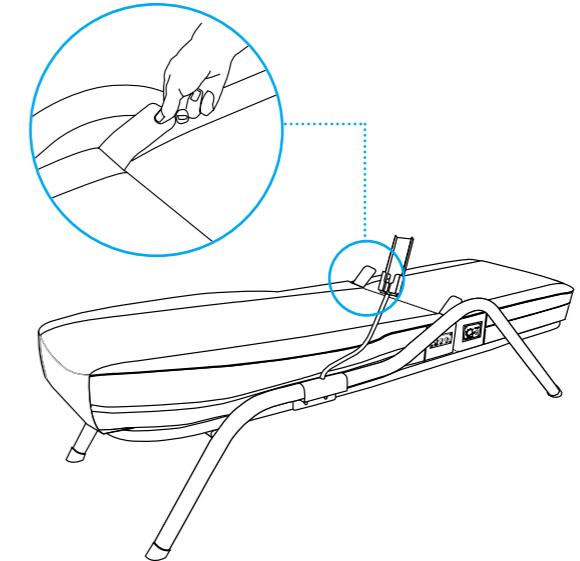


- 2** Öffnen Sie die Aufbewahrungsstelle in der Ergänzungsmatte. Nehmen Sie das Netzkabel, die Fernbedienung und externe Projektoren heraus.

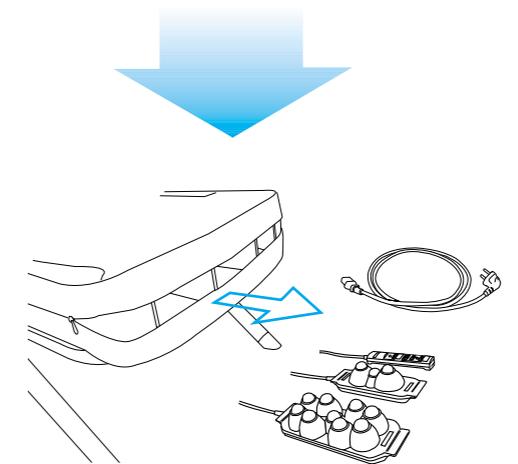

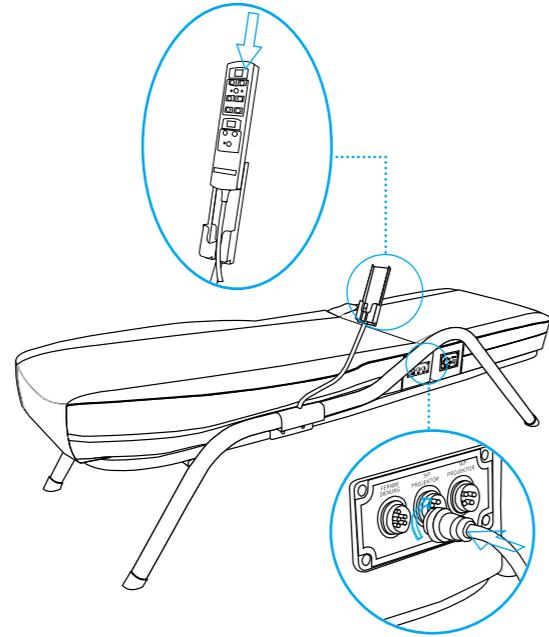


3 Legen Sie die Fernbedienung in die Haltervorrichtung und schließen Sie diese an die Fernbedienungs-Verbindung an der Hauptmatte an. Überprüfen Sie, ob der Stecker fest angeschlossen ist.

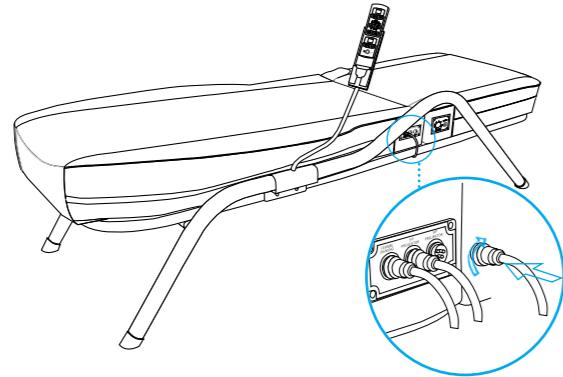

4 Schließen Sie den 3-Kugel-Projektor und den 9-Kugel-Projektor auf dieselbe Weise an. (s. Nr. 3)


※ Überprüfen Sie, ob der Stecker fest angeschlossen ist, es könnte sonst zu einer Störung des Gerätes führen.

5 Verbinden Sie die zwei Matten zusammen, indem Sie den Stecker der Ergänzungsmatte an die Hauptmatte anschließen.


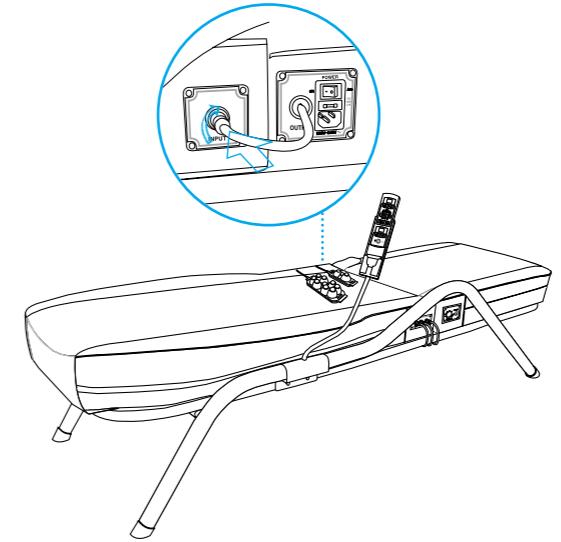


6 Schließen Sie das Netzkabel an die Hauptmatte und das andere Ende an die Steckdose. Überprüfen Sie, ob die Stromspannung bei 220-240 Volt liegt.

※ Schließen Sie den Stecker an das Gerät und dann an die Steckdose an, andernfalls könnte es Störungen geben.

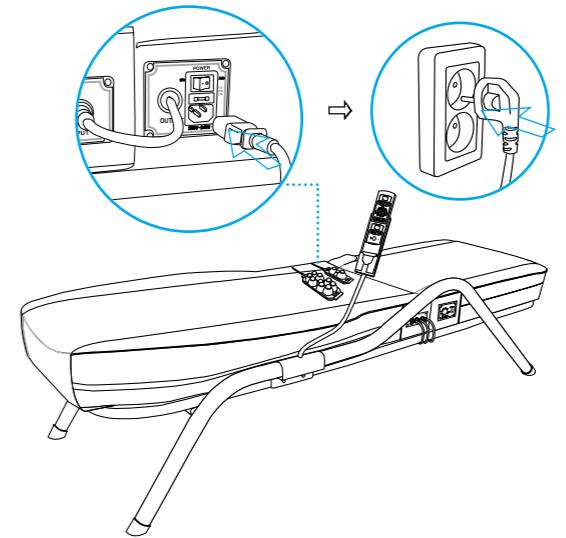


4. Testversuch nach der Montage

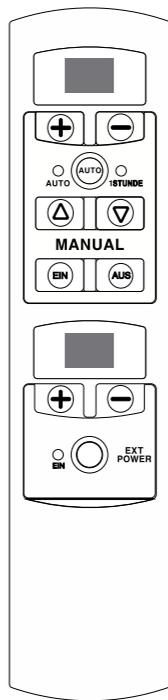
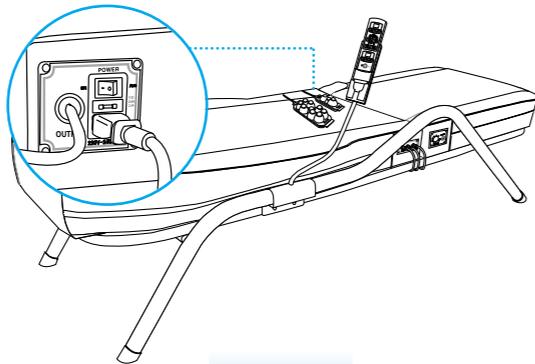


1 Schalten Sie das Gerät ein.

※ Schalten Sie das Gerät unbedingt aus, wenn Sie es nicht benutzen.

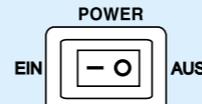

2 Schalten Sie die Fernbedienung ein und stellen Sie die passende Temperatur (empfehlenswert: zwischen 45°C und 55°C) ein. Sie können die Temperatur des internen Projektors einstellen, indem Sie die + und - Tasten verwenden, die oben sind. Die Temperatur des 3-Kugel-Projektors und des 9-Kugel-Projektors kann mit den + und - Tasten, die unten sind, eingestellt werden. (s. auch Kapitel III).

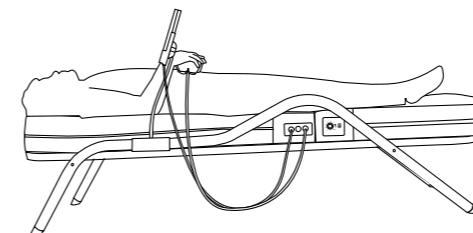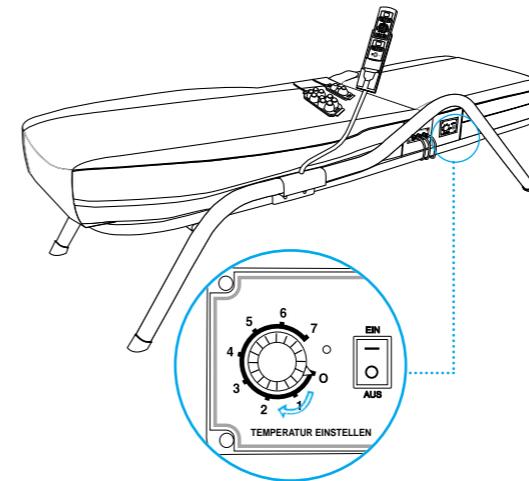


3 Die Temperatur der Epoxidcarbon-Platten (Heizplatten) in der Hauptmatte und der Ergänzungsmatte kann mit dem Temperatur-Drehknopf eingestellt werden, der befindet sich an der Seite der Matte. (empfehlenswert: zwischen 3 und 4)

4 Legen Sie Ihren Oberkörper auf die Hauptmatte und Ihre Beine auf die Ergänzungsmatte und betätigen Sie die AUTO-Taste. Das Programm läuft dann automatisch. Außerdem können Sie sich auch umgekehrt hinlegen (s. auch Kapitel III).

※ Vorsicht!

1. Zuerst schließen Sie die Fernbedienung an die Hauptmatte und dann den Stecker anschließen.
2. Die Temperatur kann der Benutzer selbst bestimmen (empfehlenswert: 45°C und 55°C).
3. Nach der Benutzung ziehe Sie das Netzkabel raus.

III . Benutzung des Produktes

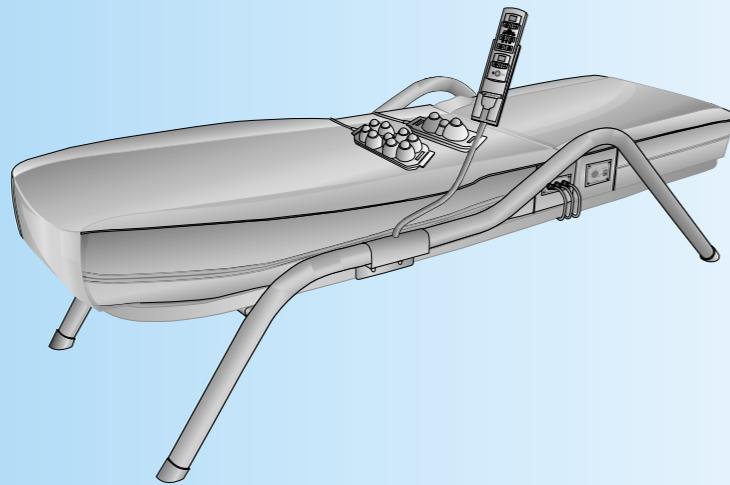

ceragem
master
CGM-M3500


1. Benutzung der Fernbedienung
 - Automatischer Modus
 - Halbautomatischer Modus
 - Externer Projektor
2. Einstellung der Epoxidcarbon-Platten(Heizplatten)
3. Verschiedene Methoden

1. Benutzung der Fernbedienung

Automatischer Modus

Der Automatische Modus läuft 40 Minuten lang nach Programm.

※ Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung vor dem Gebrauch richtig angeschlossen ist.

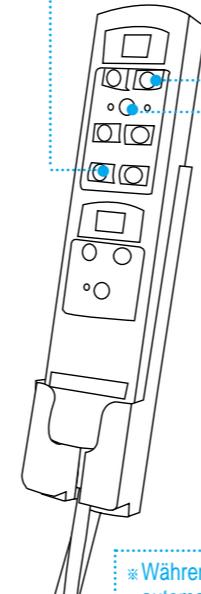

※ Während des automatischen Modus können Sie die Temperatur selber bestimmen. Wenn die manuelle Taste während des automatischen Modus betätigt wird, stoppt dieser automatische Modus. Das Gerät befindet sich im halbautomatischen Modus.

1

Betätigen Sie EIN-Taste, dann leuchtet die 1 Stunde-Lampe auf.

2

Stellen Sie die geeignete Temperatur für Ihren Körper ein (empfehlenswert: zwischen 45°C und 55°C). (Bei einmaligem Drücken wird die eingestellte Temperatur angezeigt. Sie können durch weiteres Drücken der Taste die Temperatur verändern. Aber wenn Sie nach einmaligem Drücken nicht weiter die Taste betätigen, wird die aktuelle Temperatur in zwei Sekunden gezeigt.)


※ Die Temperatur des externen Projektors und der Epoxidcarbon-Platten(Heizplatten) wird nicht verändert.

3

Betätigen Sie die AUTO-Taste einmal, dann leuchtet die Anzeigelampe für AUTO auf. Der automatische Modus läuft automatisch 40 Minuten lang.

Halbautomatischer Modus

Wenn Sie nach dem automatischen Modus das Gerät an bestimmte Körperteile verwenden wollen:

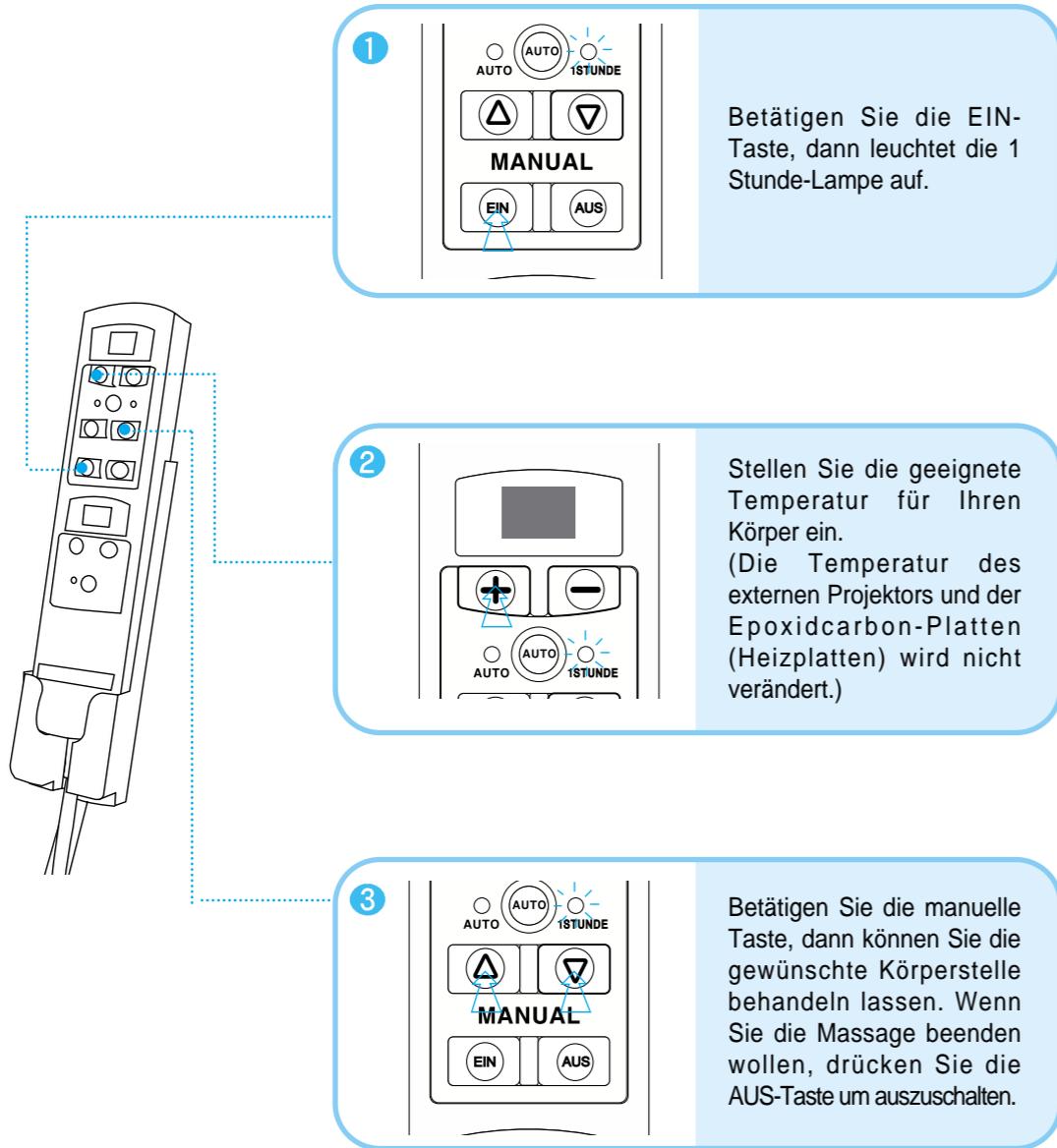

1 Betätigen Sie die EIN-Taste, dann leuchtet die 1 Stunde-Lampe auf.

2 Stellen Sie die geeignete Temperatur für Ihren Körper ein. (Die Temperatur des externen Projektors und der Epoxidcarbon-Platten (Heizplatten) wird nicht verändert.)


3 Betätigen Sie die manuelle Taste, dann können Sie die gewünschte Körperstelle behandeln lassen. Wenn Sie die Massage beenden wollen, drücken Sie die AUS-Taste um auszuschalten.

Externe Projektoren



Durch direkte Anwendung des externen Projektors auf Ihre Haut kann es zu Hautverbrennungen kommen. Überprüfen Sie, ob die Projektoren mit der Projektorverkleidungen ganz abgedeckt sind.

※ Überprüfen Sie, ob die Projektoren vor dem Gebrauch richtig angeschlossen sind.

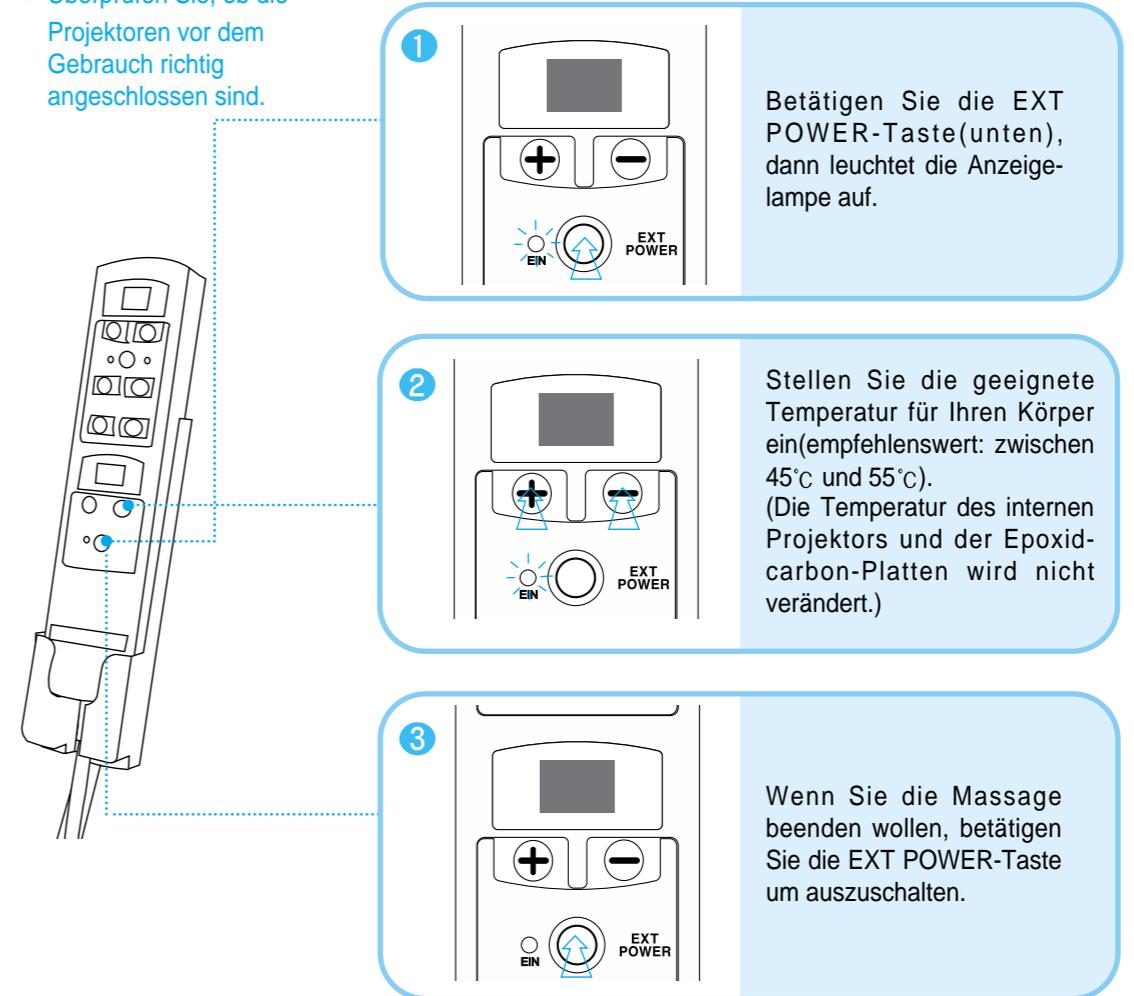

1 Betätigen Sie die EXT POWER-Taste (unten), dann leuchtet die Anzeigelampe auf.


2 Stellen Sie die geeignete Temperatur für Ihren Körper ein (empfehlenswert: zwischen 45°C und 55°C). (Die Temperatur des internen Projektors und der Epoxidcarbon-Platten wird nicht verändert.)

3 Wenn Sie die Massage beenden wollen, betätigen Sie die EXT POWER-Taste um auszuschalten.


※ Sie können den 9-Kugel-Projektor und den 3-Kugel-Projektor durch das Drücken der POWER-Taste ein- und ausschalten (s. Diagramm).

Power	3-Kugel-Projektor	9-Kugel-Projektor	Epoxidcarbon-Platten
einmal Drücken	EIN	EIN	EIN
zweimal Drücken	AUS	AUS	AUS

2. Einstellung der Epoxidcarbon-Platten

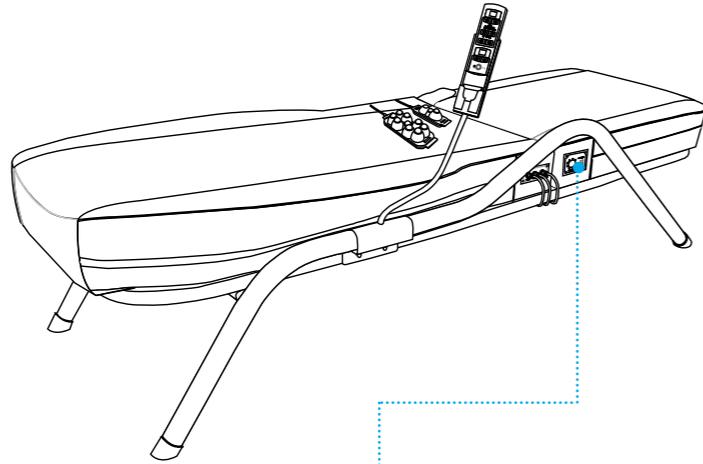


1

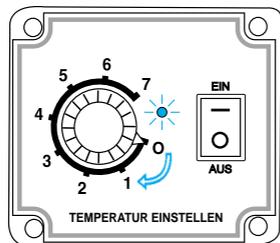


Für die Epoxidcarbon-Platten gibt es einen anderen Temperaturdrehknopf an der Seite der Ergänzungsmatte. Nach dem Einschalten des Gerätes betätigen Sie die Einschalttaste für die Epoxidcarbon-Platten und die Fernbedienung, dann leuchtet die Lampe neben dem Temperaturdrehknopf auf.

2

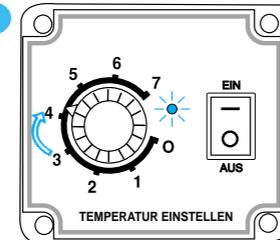

Wählen Sie eine geeignete Temperatur aus. (empfehlenswert : Stufe zwischen 3 und 4)


3

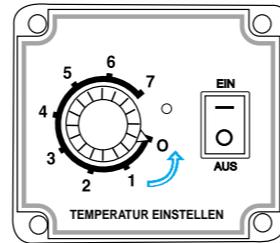

Die Epoxidcarbon-Platten sind in der Haupt- und Ergänzungsmatte eingebaut. Somit haben alle Matten die gleiche Temperatur. Nach der Benutzung schalten Sie die Einschalttaste aus.

※ Der Temperaturdrehknopf funktioniert nur, wenn die EXT POWER-Taste eingeschaltet ist.

3. Benutzung des Produktes

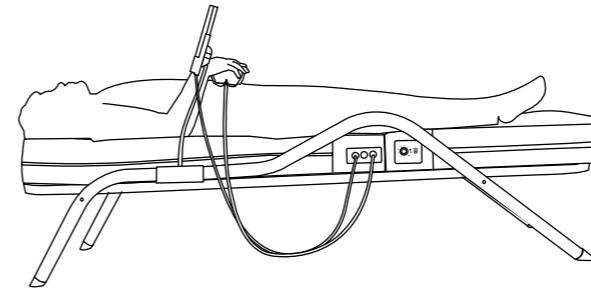


1. Standardmodus

- 1) Massiert den oberen Körperbereich.
- 2) Wärmt den oberen Körperbereich mit infraroten Strahlen.
- 3) Wärmt den oberen Körperbereich durch die Epoxidcarbon-Platten.
- 4) Wärmt den unteren Körperbereich durch die Epoxidcarbon-Platten.
- 5) Wärmt und massiert den Bauchbereich mit infraroten Strahlen.

Wie man den Standardmodus anwendet:

1. Legen Sie Ihren Kopf auf die Hauptmatte und Ihre Beine auf die Ergänzungsmatte.
2. Wenn Sie den automatischen Modus wählen, können Sie den 3-Kugel-Projektor oder den 9-Kugel-Projektor verwenden, damit auch der Bauch und Arm massiert wird.
3. Sie können das automatische Programm wiederholen oder Sie können den halbautomatischen Modus einschalten und ihn an den gewünschten Körperstellen anwenden.

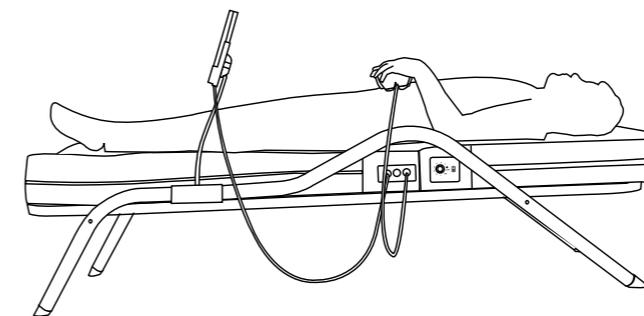


2. Umgekehrter Standardmodus

- 1) Massiert den unteren Körperbereich.
- 2) Wärmt den unteren Körperbereich mit infraroten Strahlen.
- 3) Wärmt den unteren Körperbereich durch die Epoxidcarbon-Platten.
- 4) Wärmt den oberen Körperbereich durch die Epoxidcarbon-Platten.
- 5) Wärmt und massiert den Bauchbereich mit infraroten Strahlen.

Wie man den umgekehrten Standardmodus anwendet:

1. Legen Sie Ihren Kopf auf die Ergänzungsmatte und Ihre Beine auf die Hauptmatte.
2. Folgen Sie dieselben Anweisungen, wie im Standardmodusprogramm. Sie können den 3-Kugel-Projektor oder den 9-Kugel-Projektor verwenden, damit auch der Bauch und Arm massiert wird.

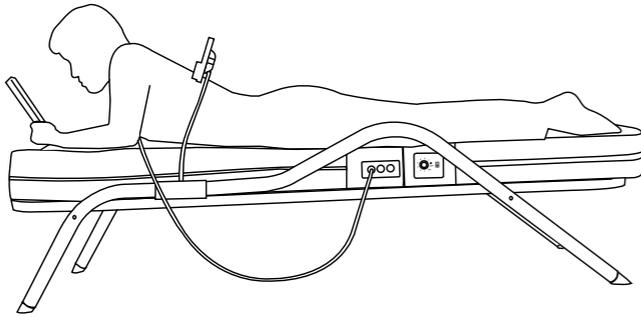

3. Bauch-Modus


- 1) Massiert den Bauchbereich.
- 2) Wärmt den Bauch mit infraroten Strahlen.
- 3) Wärmt den Bauch durch die Epoxidcarbon-Platten.
- 4) Wärmt den unteren Körperteil durch die Epoxidcarbon-Platten.

Wie man den Bauch-Modus anwendet:

1. Legen Sie Ihren Kopf auf die Hauptmatte und Ihre Beine auf die Ergänzungsmatte.
2. Massieren Sie den Bauchbereich mit manuellen Tasten(▲ oder ▼).



Die Bauchmassage ist nur für den Bauchbereich und nicht für Brustbereich bestimmt. Verwenden Sie immer den halbautomatischen Modus, wenn Sie den Bauchbereich massieren lassen wollen.

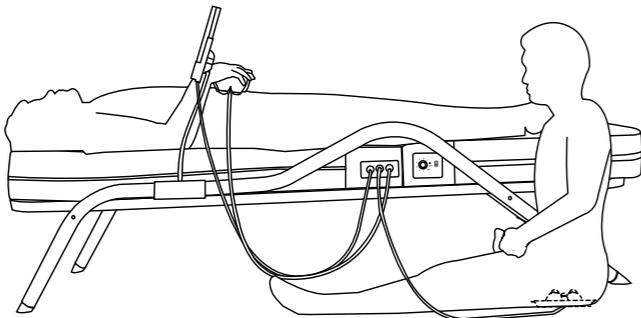


4. Zwei-Personen Modus

※ Zwei Personen können das Gerät gleichzeitig benutzen. Einer kann den Standardmodus verwenden, während der andere entweder seinen oberen oder unteren Körperteil mit den Projektoren massiert.

Wie man den Zwei-Personen Modus anwendet:

1. Einer benutzt den Standardmodus.
2. Der andere legt den 3-Kugel-Projektor auf dem Boden und setzt sich drauf.
3. Wenn der 9-Kugel-Projektor nicht von der liegenden Person benutzt wird, kann die zweite Person es verwenden.

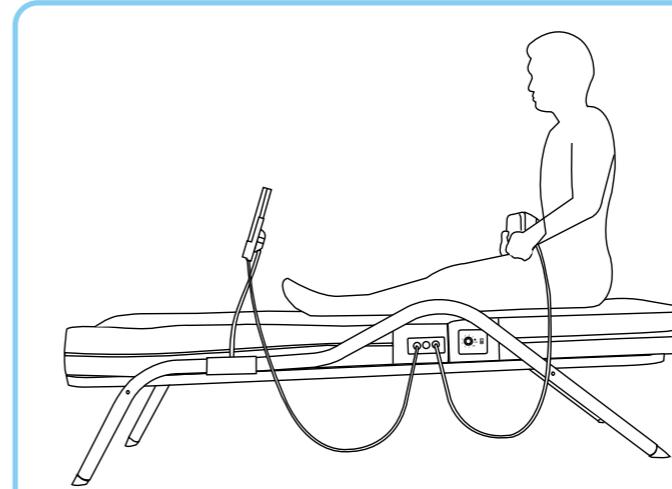


5. Sitz-Modus

- 1) Wärmt den unteren Körperbereich durch die Epoxidcarbon-Platten.
- 2) Wärmt und massiert den oberen und unteren Körperbereich mit infraroten Strahlen.

Wie man den Sitz-Modus anwendet:

1. Zuerst müssen Sie die gewünschte Temperatur selber für die Epoxidcarbon-Platten einstellen.
2. Setzen Sie sich auf die Ergänzungsmatte hin und Ihre Beine sollen auf die Hauptmatte gelegt werden.
3. Der Ablauf ist derselbe wie im Standardmodusprogramm und massieren Sie dabei auch Ihren Bauchbereich oder Arm mit dem 9-Kugel-Projektor.

VI. Wartung des Produktes

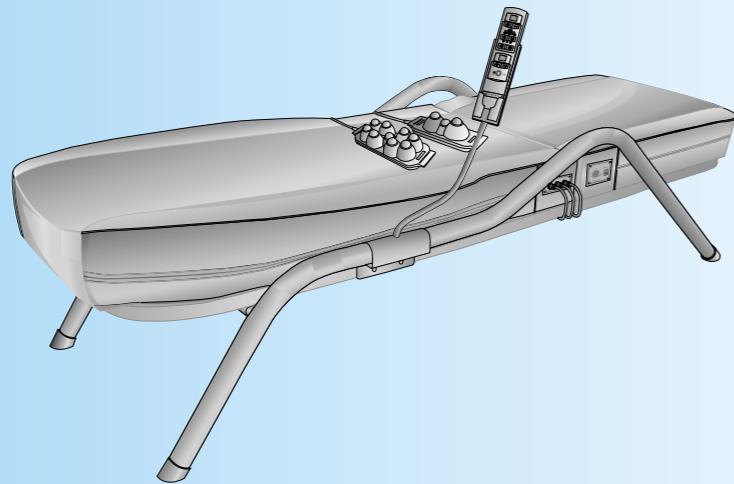


ceragem
master
CGM-M3500

1. Maßnahmen zur Sicherheit
 2. Bevor Sie den Kunden-Service anrufen
 3. Technische Daten
- Garantie



1. Maßnahmen zur Sicherheit

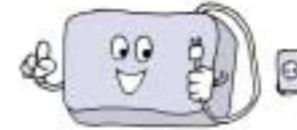


- 1) Überprüfen Sie nach jedem Gebrauch, ob das Netzkabel vom Anschluss getrennt ist.



Gefahr

- 2) Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander, um es zu verbessern oder zu reparieren. Wenn es repariert werden muss, wenden Sie sich an den Kunden-Service.

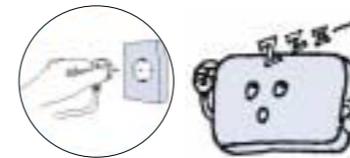


- 3) Bei merkwürdigen Geräuschen oder Fehlfunktion des Gerätes schalten Sie es sofort aus und wenden Sie sich an den Kunden-Service.



Gefahr

- 4) Verbiegen oder misshandeln Sie das Netzkabel nicht (Dies kann sonst zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen).

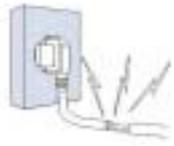

Gefahr

5) Verwenden Sie keine alten oder beschädigten Steckdosen und Stecker.




Gefahr

6) Berühren oder ziehen Sie nicht an den Stecker mit nassen Händen (Dies kann sonst zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen).



Gefahr

7) Schließen Sie den Stecker nur an den geerdeten Anschluss an.(Dies kann sonst zu einem elektrischen Schlag führen).

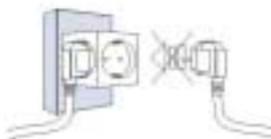

Gefahr

8) An einer Steckdose sollten nicht mehrere Stecker angeschlossen sein (Dies kann sonst zu einem Brand führen).



Gefahr

9) Falls es ein Gewitter gibt oder das Gerät nicht im Betrieb ist, trennen sie den Anschluss zu Ihrer eigenen Sicherheit (Dies kann sonst zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen).

- 10) Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist, trennen Sie es vom Anschluss und benutzen Sie es nicht weiter.
- 11) Benutzen Sie das Produkt nicht gleich nach dem Baden oder Duschen.
- 12) Benutzen oder bewahren sie das Produkt nicht im Badezimmer oder in der Küche auf.

2. Bevor Sie den Kunden-Service anrufen



Was soll ich machen, wenn die Fernbedienung nicht leuchtet...

Probleme	Lösung
Ist der Stecker richtig angeschlossen?	Schließen Sie das Netzkabel erneut an.
Ist die Fernbedienung richtig angeschlossen?	Schließen Sie die Fernbedienung erneut an.
Ist die Sicherung durchgebrannt?	Wechseln Sie die Sicherung aus.



Was soll ich machen, wenn der Projektor nicht leuchtet...

Probleme	Lösung
Leuchtet die Lampe nicht? Haben Sie schon den Anschluss überprüft?	Wenn das Problem fortbesteht, nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, sondern wenden Sie sich an den Kunden-Service.



Der Projektor bewegt sich nicht.

Probleme	Lösung
Funktioniert der interne Projektor nicht? Überprüfen Sie den Schalter und den Anschluss.	Wenn das Problem fortbesteht, nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, sondern wenden Sie sich an den Kunden-Service.




Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Probleme	Lösung
Trennen Sie den Anschluss der Fernbedienung und schließen Sie ihn danach wieder an.	Wenn das Problem fortbesteht, nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, sondern wenden Sie sich an den Kunden-Service.

3. Technische Daten

Modell-Nr.	CGM-M3500
Name des Produktes	Massagegerät
Spannung	AC 220-240 V~, 50/60Hz
Elektrische Leistung	250-300W (maximal)
Temperatur der Jade-Kugel	30-60 °C
Maße des Produktes	1210mm x 630mm x 150mm (Hauptmatte)
	770mm x 540mm x 120mm (Ergänzungsmatte)
	1260mm x 590mm x 145mm (Rahmen)
Gewicht (einschließlich Verpackung)	28Kg (Hauptmatte)
	10Kg (Ergänzungsmatte)
	23Kg (Rahmen)

※ Für eine neue Entwicklung dieses Produktes können sein Design und/oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung verändert werden.

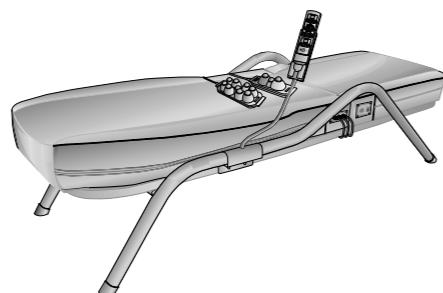

Ceragem CGM-M3500 Personal Massager
LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT

Garantie

- ▶ Die Ceragem Co., Ltd. bietet die Garantie des Produktes gemäß dem Verbraucherschutzgesetz.
- ▶ Das Produkt, das Sie vom anerkannten Ceragem-Händler gekauft haben, ist während der Garantiefrist von Defekten der Materialien unter normalem Gebrauch voll garantiert.
- ▶ Wenn ein Defekt auftritt, setzen Sie sich mit Ihrem Händler (dort, wo Sie es erworben haben) oder dem nächsten Ceragem-Center in Verbindung. Falls Sie ihn nicht erreichen können, wenden Sie sich an Ceragem Deutschland GmbH in Berlin.

Name des Produktes	Ceragem Massage-Gerät	Kundenname	
Modell-Nummer	CGM-M3500	Adresse 1	
Serien-Nummer		Adresse 2	
Garantie-Zeit	2 Jahre ab dem Kaufdatum	Stadt	
Kaufdatum		Postleitzahl	
Kaufort		Telefonnummer	

Lassen Sie die Garantiekarte vom Händler ausfüllen, damit Sie in der Zukunft den Kunden-Service in Anspruch nehmen können.

Kostenloser Service

Der kostenlose Service besteht nur, wenn ein Defekt am Gerät in den 2 Jahren nach Erwerb auftritt. Die Garantiefrist kann sich auf 1 Jahr verkürzen, wenn das Produkt nicht für privaten Zweck sondern für geschäftlichen Zweck benutzt wird.

Service, der mit Kosten verbunden ist...

Überprüfen Sie selbst noch einmal, ob die folgenden Probleme gelöst werden können, bevor sie den Kunden-Service anrufen. Für die folgenden Fälle wird eine zusätzliche Gebühr verlangt auch während der Garantiefrist.

Bitte nehmen Sie folgende Punkte zur Kenntnis:

- Das Produkt ist nicht an einer Steckdose von 220-240 Volt angeschlossen.
- Die Kabel sind nicht richtig angeschlossen.
- Der Kunde hat das Produkt ungeschickt aufgebaut.
- Das Problem ist während der Benutzung durch den ungeschickten Kunden entstanden.

Beschränkungen

Der Kunde selbst kann für die Störungen und Beschädigungen des Produktes verantwortlich sein, wenn...

- Sie nicht einen Fachmann beauftragt haben, um das Produkt zu reparieren.
- Sie versucht haben, das Produkt selbst auseinander zu nehmen oder umzugestalten.
- Beschädigungen und Störungen, durch falsches Anwenden, Misshandlung oder fahrlässige Behandlung des Produktes entstanden sind.
- Beschädigung durch Naturkatastrophe entstanden ist.
- Gegenstände, wie die Platten, die Projektorverkleidung oder der Gürtel durch alltäglichen Gebrauch abgenutzt wurden.

Garantie-Bedingungen

Diese Garantie beginnt ab dem Kaufdatum.

Sie ist nur für den Kunden gültig, der das Gerät selbst gekauft hat, d.h.: die Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantiekarte ist nicht gültig, wenn sie nicht von Ceragem ausgestellt worden ist oder die Garantie abgelaufen ist.

CERAGEM DEUTSCHLAND GMBH

Mergenthalerallee 25, D-65760 Eschborn, Germany
Tel. 49-6196-967-6886 Fax. 49-6196-967-6887

CERAGEM CO., LTD.

177-14, Osaekdang-ri, Seongger-eup, Cheonan-si,
Chungcheongnam-do, KOREA

Tel : 82-41-523-2550 Fax: 82-41-523-2560

MEMO



CERAGEM

Handbuch

Lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie das CGM-M3500 verwenden.



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

ceragem
master



CGM-M3500



CERAGEM